

S-3DM

SPRAY DETERGENT DESINFECTANT
POUR SURFACES, PETIT MATERIEL,
DISPOSITIFS MEDICAUX.

Dispositif médical classe IIa.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection:

- des dispositifs médicaux non-invasifs et non-immérgeables (petit matériel en milieu médical et dentaire).
- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et hospitalier.

FORMULE

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.
Parfum : menthol.

Actifs: Ethanol (CAS 64-17-5) (<3%),
Dimethylbenzylammonium chloride (CAS 7173-51-5),
Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (<1%).

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m² soit 22 pulvérisations).

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697*, EN14561**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN14562**	5 min
FONGICIDE	EN14562** sur Aspergillus Fugimatus.	5 min
TUBERCULOCIDE	EN14348**, EN14563** sur Mycobacterium Terrae.	15 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus**.	1 min
	EN14476** sur Rotavirus.	15 min

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, ** 3g/L albumine bovine

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aucun pictogramme de danger.

En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

REF : S-3DM

Spray 750ml.

Carton de 6 sprays.

Palette de 100 cartons.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Langues : français, anglais, espagnol.

Consignes de tri : Flacon + pompe à mettre dans la poubelle de tri.

EAN13 : 3468080782884.

Produit fabriqué en France.